


MANUAL DE MONTAGEM FACE SHIELD

Componentes do Protetor Facial:

FOCUS PACK
(21) 3272 2655
www.focuspack.com.br

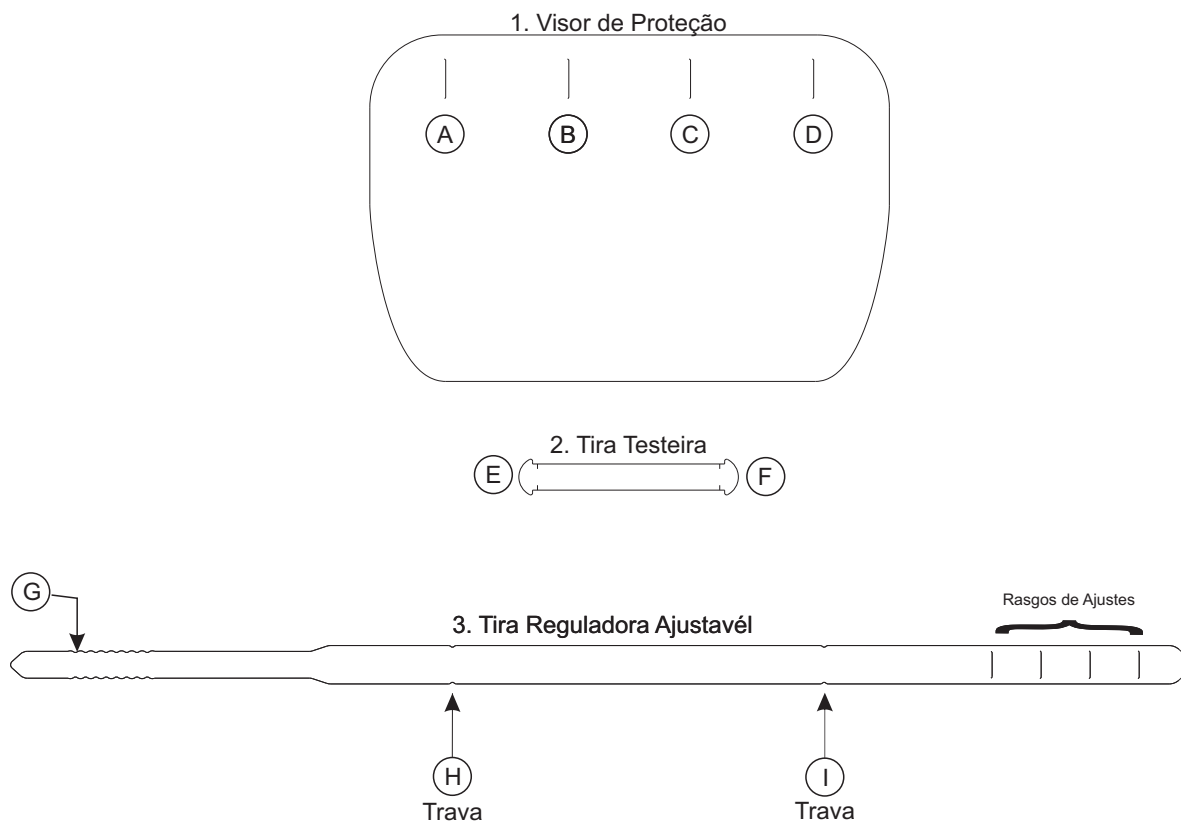

ANTES DE MONTAR HIGIENIZE AS MÃOS

1. Retire a película plástica protetora do VISOR;
2. Introduza a TIRA TESTEIRA, extremidade (E) no rasgo (A) e, faça o mesmo com a extremidade (F) no rasgo (D) do VISOR. Isso definirá a curva que dará o formato a MÁSCARA.
3. Respeitando a curvatura da Face Shield, introduza a TIRA REGULADORA AJUSTÁVEL (G) pela parte frontal do rasgo (D) transpassando pelos rasgos (C), (B) e (A) do VISOR até chegar as travas destacadas (H) e (I). Sendo TRAVA (H) no rasgo (A) e TRAVA (I) no rasgo (D). Após montada, transpasse a ponta da TIRA REGULADORA em todos rasgos de ajuste e aperte de acordo com sua cabeça.

Observações:

- Leve, resistente e fácil manipulação
- Peso total aproximado 67 gr
- Fácil limpeza e higienização
 - * Usar álcool 70% ou álcool em gel, ou lavar com água e sabão neutro, usar pano macio e limpo.
- NÃO USAR PRODUTOS ABRASIVOS OU CORROSIVOS